

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

I. YÊU CẦU ĐỐI VỚI BỆNH NHÂN

Bệnh nhân thực hiện loại bỏ các tư trang có thể ảnh hưởng đến quá trình thực hiện chức năng của sản phẩm và làm theo hướng dẫn trực tiếp của Bác sĩ chuyên môn.

II. HƯỚNG DẪN THAO TÁC DÀNH CHO CÁN BỘ Y TẾ

Để sử dụng, thực hiện tính năng sản phẩm lưới mặt nạ nhằm hỗ trợ trong quá trình xạ trị sẽ mất một vài phút thực hiện các bước theo quy trình sau:

1. Thực hiện tháo bỏ bao bì của sản phẩm.
2. Lắp đặt các chốt định vị tương ứng (nếu có) *
3. Hóa mềm sản phẩm: Đặt sản phẩm vào bể điều nhiệt nước ấm hoặc buồng gia nhiệt ($\sim 65^{\circ}\text{C}$) trong khoảng 5 - 7 phút.
4. Lấy sản phẩm ra khỏi bể điều nhiệt, dùng khăn lau bớt nước ấm đọng trên sản phẩm.
5. Làm giãn sơ bộ: Dùng tay tác động lực vào giữa sản phẩm để làm giãn sơ bộ tấm lưới mặt nạ.
6. Làm giãn cục bộ: áp mặt nạ lên mặt của bệnh nhân, kéo giãn đều 2 bên khung mặt nạ, sau đó ấn các chốt định vị trên khung mặt nạ xuống đúng vị trí định vị ở tấm phẳng composit mà bệnh nhân nằm cố định lên trước đó.
7. Làm giãn chi tiết, tạo khuôn chính xác: Thực hiện vuốt, làm giãn theo các góc, hốc (gò má, hốc mắt, mũi, lỗ tai...) chi tiết trên bộ phận liên quan để tạo khuôn lưới mặt nạ chính xác theo đặc điểm khuôn mặt của mỗi bệnh nhân.
8. Thực hiện đánh dấu chuyên môn.

III. LƯU Ý

Trong quá trình thực hiện chức năng sản phẩm, bệnh nhân sẽ có cảm giác nóng ấm và ướt tại bề mặt tiếp xúc.

IV. ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN

Bảo quản sản phẩm ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.

(*) Hướng dẫn lắp đặt Chốt định vị

Hướng ngạnh theo hình (1) sao cho đúng hướng ngạnh theo hình (2).

Khi đúng vị trí, dùng tay ấn mạnh xuống theo hình (3).

Lưu ý: Để ý các vị trí đúng như hình ảnh mô tả.

